

FFP2-Schutzmaske Tragehinweis und Aufklärung über den richtigen Gebrauch:



1. Die Maske an den Ohrenschlaufen (Nasenclip oben) gegen das Kinn ansetzen und über die Nase ziehen. Die Ohrenschlaufen über die Ohren ziehen.



2. Drücken Sie den Nasenstreifen zusammen, um ihn an die Form der Nase anzupassen. Wichtig: Prüfen Sie die Passform um die Dichtheit sicherzustellen und korrigieren Sie ggf. den Nasenclip nochmal.

3. FFP2-Masken sind Einwegprodukte und sollten nach ca. acht Stunden oder bei früherer Durchfeuchtung entsorgt werden. Nur solange die Maske nicht beschmutzt oder kontaminiert und nicht beschädigt ist, behält sie ihre Funktionstüchtigkeit.

Datenschutzinformation gem. Art 13 DSGVO:

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen:

ÖSB Gruppe Management GmbH
Obere Donaustraße 33, 1020 Wien
T: + 43 1 3300500
E: office@oesb-gruppe.com

Sie erreichen unsere Datenschutzbeauftragte unter

M: +43 664 60177 5790 | F: +43 316 90612 5897 | E: datenschutz@oesb-gruppe.com

Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung:

Wir erheben Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und den Zeitraum Ihrer Anwesenheit an unserem Standort und die Information, zu welchen Personen Sie vor Ort Kontakt haben, um bei Auftreten eines Corona-Erkrankungsfalles nachvollziehen zu können, welche Personen sich an unserem Standort angesteckt haben könnten.

Wir verarbeiten die genannten personenbezogenen Daten, um gegebenenfalls unserer Informationspflicht über anzeigepflichtige Krankheiten nachkommen zu können auf Grundlage der §§ 2, 3 und 5 Epidemiegesetz 1950 sowie auf Grundlage der Fürsorgepflicht unseren ArbeitnehmerInnen gegenüber gem § 3 ASchG.

Empfänger oder Kategorien von Empfängern:

Bei Auftreten von Corona-Verdachtsfällen oder bestätigten Corona-Erkrankungen hinsichtlich Personen, die sich an unserem Standort aufgehalten werden, werden die relevanten personenbezogenen Daten an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde weitergegeben.

Speicherdauer:

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden nur solange aufbewahrt, wie dies zur Gewährleistung des genannten Zwecks erforderlich ist.

Betroffenenrechte:

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Bitte wenden Sie sich zur Ausübung dieser Rechte an oben angeführte Datenschutzbeauftragte.

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.

Herzlich willkommen bei der ÖSB Gruppe!

Für ein gutes Miteinander achten wir auf maximal mögliche Sicherheit für Sie und unsere Mitarbeiter*innen. Im Folgenden möchten wir Sie über unsere Hygiene- und Schutzmaßnahmen informieren. Bitte lesen Sie dieses Infoschreiben aufmerksam durch und geben Sie es unterschrieben bei Ihrem*Ihrer Ansprechpartner*in ab.

Grundsätzlich gilt an Standorten der ÖSB Gruppe:



Wenn Sie krank sind, betreten Sie NICHT das Gebäude – gehen Sie nach Hause und kontaktieren Sie Ihre*n Berater*in.



Abstand halten – mindestens 2 Meter.



Sie müssen im Gebäude eine FFP2-Schutzmaske tragen.
Beachten Sie den Tragehinweis auf der Rückseite.



Wir achten auf einen kontrollierten Zugang ins Gebäude.



Sofort beim Betreten des Gebäudes bitten wir Sie die Hände zu desinfizieren!



Bitte halten Sie sich an unsere Leitsysteme!

Bitte folgen Sie **IMMER** den Anweisungen unseres Personals und halten Sie sich an genannte Hygiene- und Schutzmaßnahmen sowie vorgegebene Leitsysteme!

Ich habe diese Informationen zur Kenntnis genommen und werde die Maßnahmen umsetzen.

.....
Name in Blockbuchstaben

.....
Telefonnummer

.....
Datum

.....
Unterschrift